

# Schrittweise Gebrauchsanweisung

Überstehende Ränder der Abdrucknahme und überhöhte Gaumenpartien zurückschneiden.



Legen Sie die Plastikbasis (BAFIX®) auf den Abdruck, visualisieren die richtige Position der Zähne zu individualisieren.



Referenzmarkierung (Mittellinie) zwischen Abdrucklöffel und der Plastikbasis (BAFIX®) anbringen.



Abdruck und BAFIX® mit Gips auffüllen.



Den Abdrucklöffel auf die Basis setzen unter Berücksichtigung der Referenzmarkierung. Gipsüberschüsse entfernen.



Nach Abbindung den Abdrucklöffel von der Basis adheben.



Die seitlichen blauen Fixierungsbänder der Basis mit einem Instrument lösen und abziehen Gipsüberschüsse.



Auf die seitlichen Vorsprünge und den hinteren Teil der Basis klopfen bis sich das Modell löst.



Sind alle überschüssigen Gipsreste gründlich entfernt, kann mit der gewohnten Individualisierung des Modells (Sägmodell) vorgefahren werden.