



BAFIX1[®]

La mejor **base** para tu trabajo



Mod. Reg. C.E.
000157177-0001



Development and Technology
of Dental Systems

Desarrollo y Tecnología
de Sistemas Dentales

Julián Camarillo, 7 - 3º C - 28037 MADRID - Teléfono: +34 913 049 305 - Fax: +34 913 043 924
e-mail: dtds@dtdsystems.com -web: www.dtdsystems.com


toda facilidad.

Instrucciones de trabajo paso a paso

Recortar los rebordes sobresalientes de la impresión, y en su caso la altura excesiva del paladar.



Colocar la base sobre la impresión visualizando la correcta posición de las piezas a individualizar.

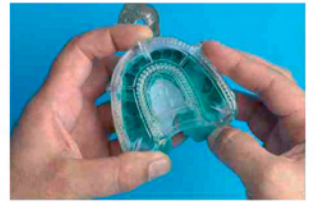

Realizar marcas de referencia entre la cubeta de impresión y la base plástica.



Rellenar la impresión y la base con escayola, y al mismo tiempo, enrasando la base y la impresión



Posicionar la base sobre la cubeta de impresión, guiándose por las marcas efectuadas previamente.



Después del fraguado de la escayola golpear alrededor de la base para desprender los restos de escayola, separando después la base de la impresión.



Con un cuchillo desprender las fijaciones laterales.



Golpeando en los resaltes laterales de la base y en la parte posterior, el modelo se extrae fácilmente.



Una vez eliminados los últimos restos de escayola de los bordes se puede proceder a cortar e individualizar los modelos de la forma acostumbrada.