

En toute facilité. ... Instructions pas à pas

Découper les bavures qui dépassent l'empreinte et les éventuels excès de hauteur du palais.



Placer le BAFIX® sur l'empreinte afin de visualiser la correcte position des dents à individualiser.



Effectuer des marques de positionnement sur l'empreinte en même temps que sur le BAFIX®.



Couler l'empreinte et le BAFIX® avec du plâtre en égalisant l'empreinte et le BAFIX® a la fois.



Positionner le BAFIX® sur l'empreinte, en vous servant des marques effectuées.



Une fois la prise du plâtre effectuée, tapoter légèrement le BAFIX® pour détacher les restes de plâtre. Détacher ensuite le BAFIX® de l'empreinte.



Avec l'aide d'un couteau, retirer les fixations latérales.



En tapotant de manière répétée sur les parties latérales et sur la zone postérieure du BAFIX®, le modèle s'extraira facilement.



Eliminer les dernières restes de plâtre sur les rebords. Le modèle peut à présent être préparé et individualisé en utilisant la méthode habituelle.