

Con toda facilidad. ... Instrucciones paso a paso

Recortar los rebordes sobresalientes de la impresión y en su caso la altura excesiva del paladar.



Colocar la BAFIX® sobre la impresión, visualizando la correcta posición de las piezas a individualizar.



Realizar marcas de referencia entre la cubeta de impresión y la BAFIX®.



Rellenar la impresión y la BAFIX® con escayola, y al mismo tiempo, enrasando la base y la impresión.



Posicionar la BAFIX® sobre la cubeta de impresión, guiándose por las marcas efectuadas previamente.



Después del fraguado de la escayola golpear alrededor de la base para desprender los restos de escayola, separando después la BAFIX® de la impresión.



Con un cuchillo desprender las fijaciones laterales.

Golpeando en los resaltes laterales de la base y en la parte posterior, el modelo se extraerá fácilmente.



Una vez eliminados los restos de escayola de los bordes se puede proceder a cortar e individualizar el modelo de la forma acostumbrada.